



Injeção Simultânea Instruções Operacionais

MEDRAD® Salient

Sistema para Injeção de Contraste

Índice

1	Introdução.....	1
1.1	Informações de Contato da Imaxeon.....	1
1.1.1	Fabricante	1
1.1.2	Representante CE	1
1.2	Advertências e Precauções.....	2
2	Protocolos de Programação	3
3	Revisão Pós-Injeção	5

1 Introdução

Salient Sistema de Injeção de Contraste Medrad fornece a capacidade de programar as seringas de contraste e solução salina para que se movam simultaneamente. O usuário pode programar as diversas proporções para alcançar a entrega volumétrica desejada do meio.

Com injeções simultâneas, você pode:

- Controlar os níveis de atenuação em ambos os ventrículos
- Minimizar artefatos
- Visualizar a artéria coronária direita e o ventrículo direito em um único estudo

Sempre conferir a etiqueta do fabricante do meio de contraste específico.

O manual operacional destina-se para ser lido com o Manual de Operações MEDRAD® Salient para instruções completas para a operação do sistema.

1.1 Informações de Contato da Imaxeon

1.1.1 Fabricante



Imaxeon Pty. Ltd.

Unit 1, 38-46 South St,
Rydalmere, Nova Gales do Sul, 2116
Austrália

Fone: +61 2 8845 4999

Fax: +61 2 8845 4936

www.imaxeon.com

info@imaxeon.com



1.1.2 Representante CE



Medical Device Safety Service (MDSS) GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover

Alemanha

Fone: +49-511-6262 8630

Fax: +49-511-6262 8633

1.2 *Advertências e Precauções*





ADVERTÊNCIAS

- **Lesões ao paciente podem resultar do uso de acessórios inadequados.** Utilize apenas acessórios e opções fornecidos pela Imaxeon/Bayer projetados para o sistema.
- **Lesões ao paciente podem resultar do alto fluxo da injeção venosa.** Tenha muito cuidado quando selecionar a taxa de fluxo. Antes de armar a injetora, verifique se os parâmetros de taxa de alto fluxo da injeção estão corretos.


2 Protocolos de Programação

Consulte o Manual de Operações Salient para instruções completas sobre os protocolos de programação. As fases de injeção simultâneas podem apenas ser programadas em protocolos multifase. O protocolo rotineiro não pode entregar injeções simultâneas.


Para iniciar, carregue qualquer protocolo multifase da lista de protocolo armazenados utilizando o botão de abrir protocolo.

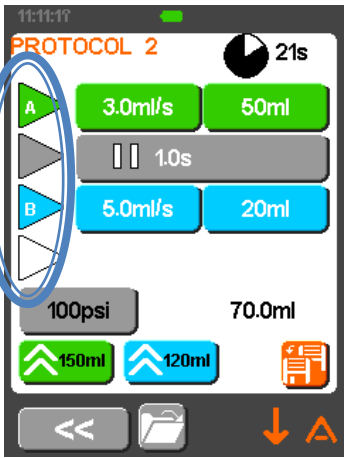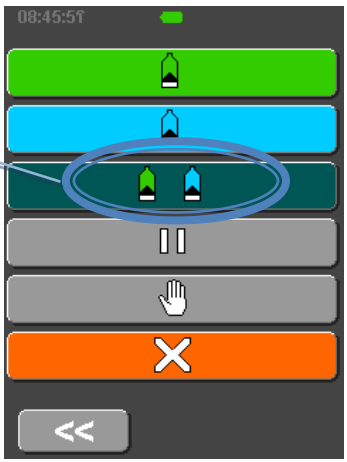Para adicionar uma fase, selecione um botão de Fase	Botões de Fase 
Selecione a Proporção de Diluição	Proporção de Diluição 


Selecione a proporção na lista de opções à direita do monitor. O valor percentual exibido é a porcentagem do contraste e o remanescente da injeção simultânea será solução salina.

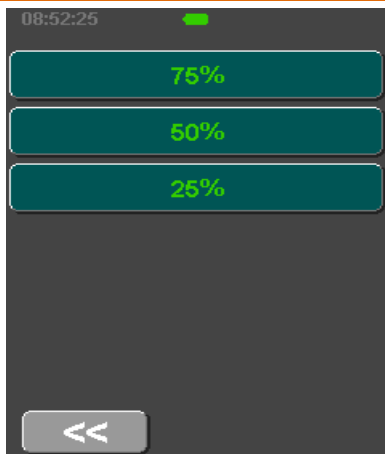

Insira a taxa de fluxo e o volume totais para aquela fase

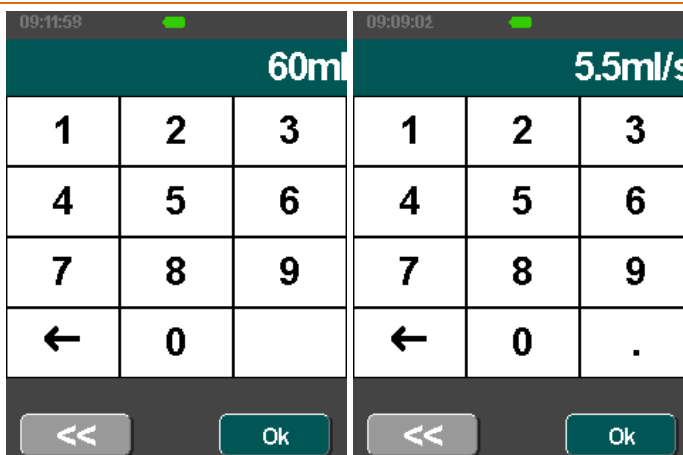


Proceda com a injeção conforme descrito no Manual de Operações Salient

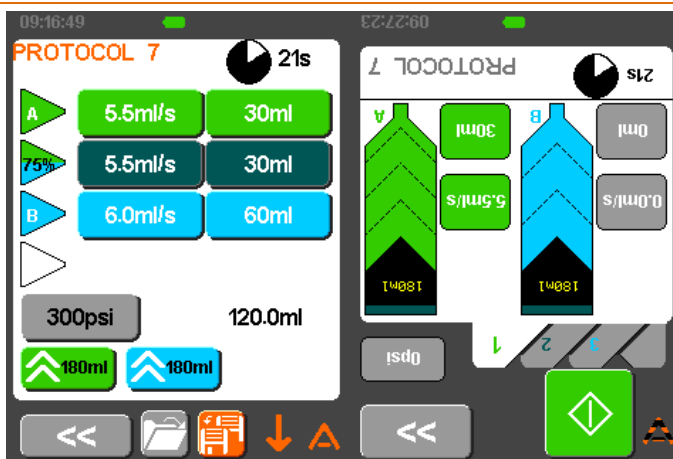

3 Revisão Pós-Injeção

Os volumes de contraste e solução salina são totalizados sobre a injeção completa e são exibidos incluindo a quantidade entregue na fase de fluxo duplo. A taxa de fluxo é uma média calculada ao longo de toda a injeção.

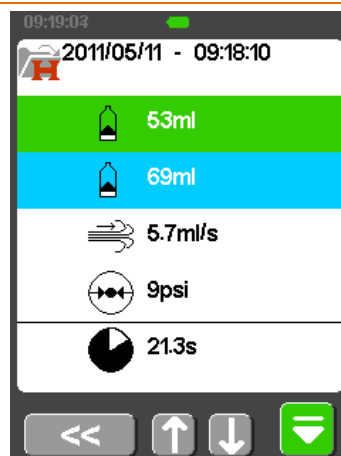

Importado por: Bayer S.A.
Rua Domingos Jorge, 1100
CEP: 04779-900 - Socorro – São Paulo – SP
CNPJ: 18.459.628/0001-15
Registro ANVISA nº: 80384380062
Resp. Téc.: Erika F. Maellaro R. - CRF-SP: 47.983
SAC 0800 702 12 41
sac@bayer.com

